

機械器具 01 手術台及び治療台  
一般医療機器 一般的名称：眼科用手術台（37225000）

販売名： RiEye Mk2S 眼科用手術台

【警告】

- ①本品は眼科用手術台です。治療の目的以外には使用しないこと。
- ②機器の操作は習熟したものの以外は、使用しないこと。
- ③患者及び使用者の安全を守り、機器を正しく使用するために、注意事項を守ること。
- ④付き添いの幼児や子供を診療中の周辺へ立ち入らせないこと。
- ⑤患者及び使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部の周辺に近寄らせないこと。
- ⑥故障した際は、適切な表示を行い、修理は専任者に任せること。
- ⑦手術台をメモリー運転する時は、周辺の機器と距離を確認して作動させること。
- ⑧電源コードを取り外す時は、コードを引っ張らないで「プラグ」を持って引き抜くこと。

【禁忌・禁止】

・次の行為の禁止

- ①機器を改造しないこと。
- ②不具合が起きている状態で使用しないこと。
- ③未整備状態で使用しないこと。  
(未整備とは、定期点検や日常点検をしていない状態を言う)
- ④有機溶剤を含有する洗剤で樹脂カバーを拭かないこと。
- ⑤機器の可動部に手や体が挟まれないように注意すること。
- ⑥専任者以外は、装置を分解、修理しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 本体寸法・重量

型式	外寸 W×D×H(mm)	重量
RiEye Mk2S	1500×600×495～895	95kg

3. その他

電源：24V 充電式バッテリー（充電時間：4時間）  
バッテリー供給電源 AC100V  
バッテリー充電電圧 29.5V 最大 19W

【動作原理】

ハンドコントローラーによる操作で、背もたれ及び座面が電動モーター駆動により傾斜、昇降し、眼科手術に適切な姿勢を保つことができる。フットスイッチによる操作も可能。

【使用目的又は効果】

本製品は、眼科医院または総合病院の眼科治療区域において、患者の眼科治療に使用することを目的とした装置である。

患者の眼科治療に適した姿勢が得られるように設計されたストレッチャー兼用で利用できる手術台である。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 患者を手術台に乗せ、手術者が操作スイッチ（ハンドコントローラー）を用い、患者が最も安定した姿勢で、また手術者が最もオペレーションしやすい体制に手術台の角度及び高さの調整を行い、手術に用いること。

【使用上の注意】

1. 手術台は 体重300kg 以上の患者に使用しないこと。
2. 手術中は、4つの全ての車輪用の中央ブレーキで車輪をロックすること。
3. トレンデレンブルグ・ボタンはオン/オフ・ボタンに優先するので操作には十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

【耐用期間】

指定された定期点検を実施した場合、10年 [自己認証 (当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

【使用者による点検事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 使用後は、手術台を水拭きし、消毒剤（アルコール等）を散布し、清浄な布等で手術台を覆って下さい。
2. ステンレス製の部分は、布拭き後、潤滑油を薄く塗布して下さい。

【業者による点検事項】

推奨：当社の技術員または、当社の教育を受けた業者の専任者が行う年1回の点検

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エムエス

住所：東京都文京区本郷3丁目26番12号

電話：03-3814-1026（代表）

製造業者名：Rini社（スウェーデン リニ社）

取扱説明書を必ずご参照下さい。