

機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 器具除染用洗浄器(35424000)

販売名 : スティールコ BP100HAE-P2

【警告】

- ・本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項のすべてを熟読すること。
- ・洗浄槽、被洗浄物は高温になるため火傷に注意すること。
- ・すすぎ剤は必ず使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・下記【使用目的、効能又は効果】の使用目的以外には使用しないこと。
- ・尿器、ベッドパンの洗浄以外に使用しないこと。
- ・洗浄中に扉を開けないこと。
- ・扉に手や体が挟まれないように注意すること。
- ・開いている扉に下向きに過度な力を加えないこと。
- ・装置を改造しないこと。
- ・専任者以外は、装置を分解、修理しないこと。
- ・洗剤が接続されていない状態で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 本体寸法・重量

型式	外寸 W×D×H(mm)	重量
BP100HAE-P2	545×475×1630	70kg

扉仕様 足踏み式 自動開閉型

主な組成 ステンレス(SUS304)

※乾燥処理を促進する乾燥ファン付きタイプの装置もある。

【必要設備】

給水 20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2~0.45MPa)

給湯 20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2~0.45MPa)

排水 100A(HI/VP)

電源 3φ200V 20A ELB

【動作原理】

専用ラックに被洗浄物(尿器・ベッドパン)を搭載し、槽内に収納する。被洗浄物に適したプログラムを選択して足踏みペダルを踏むと自動で扉が閉まり、

洗浄を開始する。回転式ノズルによって洗浄水を噴射させ、内蔵ヒーターにより蒸気を発生させ除染を行う。

【使用目的又は効果】

尿器、ベッドパンを「洗浄・すすぎ・除染」の工程で自動処理するための装置。オプションとして、乾燥機能を付加できる。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 洗剤・すすぎ剤の残量を確認する。(残量が少ない場合は補充する。)
2. 電源スイッチを入れる。
3. 足踏みペダルを踏むと自動で扉が開くので、洗浄ラックに被洗浄物をセットする。
4. プログラムを選択し、足踏みペダル踏むと自動で扉が閉まり洗浄が始まる。
5. 工程終了後、扉が若干開く。(高温の蒸気に注意)
6. 足踏みペダルを踏むと自動で扉が開くので、被洗浄物を取り出す。

【使用上の注意】

1. 被洗浄物に適した洗浄ラックを使用し、適したプログラムを選択すること。
2. 高温での除染を行うため、事前に被洗浄物の耐熱温度を確認すること。
3. 洗剤は無泡性のものを使用すること。
4. 被洗浄物とラックの総重量が5kg以下であること。
5. 工程終了後、扉が開いた際に高温の蒸気が出るため顔などを近づけたりしないこと。
6. 被洗浄物が高温になっている場合があるので火傷に注意すること。
7. 給水の硬度が高い場合には、軟水の使用を推奨しますが、用意できない場合は、調整および洗浄を定期的に行うこと。
8. サーモスタット測定部等へのスケールの付着により誤作動の原因となる場合があるので、すすぎ剤の不足には十分注意すること。
9. 洗剤・すすぎ剤を補充する際には手袋やゴーグル等をして保護すること。
10. 洗剤容器の交換は、ラベルを確認し、同じラベルの容器に分量計を差し替えること。
11. 洗剤容器の量を使用前に確認すること。また、残量に応じて交換すること。
12. 洗剤容器に差し込む分量計にチューブが接続されていることを使用前に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

指定された定期点検を実施した場合、5年〔自己認証(当社データによる)〕

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による点検事項〕

取扱説明書を必ずご参照下さい。

詳細は取扱説明書を参照すること。

装置を正常に作動させるため、点検と清掃を毎日行うこと。

1. 洗剤・すすぎ剤の残量を確認すること。
2. 槽内に異物がある場合は、取り除くこと。
3. 洗浄ノズルにつまりがある場合は取り除くこと。
4. 洗剤容器に差し込まれた分量計にチューブが接続されていることを確認すること。

[業者による点検事項]

装置の性能を維持するため、年1回以上の定期点検を実施すること。

[点検内容]

1. 洗浄機能の点検
2. 推奨消耗部品の交換
3. 配管回路・送水経路の漏水及び劣化部品の点検
4. 当社が交換を推奨する消耗部品の交換及び点検  
作業については当社の技術員または、当社の教育を受けた業者の専任者が行うこと。
5. ボイラータンク内のスケール確認及び必要に応じて清掃

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社エムエス

住 所：東京都文京区本郷3丁目26番12号

電 話：03-3814-1026（代表）

製造業者名：Steelco S.P.A.（イタリア スティールコ社）

取扱説明書を必ずご参照下さい。